



GARGTEST

ZKUMAVKOVÝ FORMÁT – HROMADNÉ BALENÍ  

Návod k použití kloktací odběrové sady na výplach dutiny ústní a horních cest dýchacích.

Odběr pitnou vodou

Co je GARGTEST?

GARGTEST je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Samoodběrová sada je určena k odběru vzorků, které se vyhodnocují na přítomnost virů v dutině ústní a horních cestách dýchacích v laboratoři. Vyhodnocení provede tato laboratoř obvykle pomocí běžně dostupných molekulárně-biologických metod.

K čemu GARGTEST není určený?

1. GARGTEST neprokáže přítomnost viru na místě (při odběru), jde pouze o soupravu na samoodběr biologického materiálu, který musí být dále vyšetřený v laboratoři.
2. GARGTEST není vhodný pro vyšetření bakteriální flóry kultivačními metodami, jelikož stabilizační roztok obsahuje látky potlačující růst bakterií, kvasinek a plísní.

Proč kloktání?

1. Výplach dutiny ústní a hltanu kloktáním je velmi spolehlivý způsob samoodběru vzorku na vyšetření.
2. Samoodběr kloktáním je bezpečný a jednoduchý, snadno proveditelný i poučeným laikem.
3. Při odběru není třeba asistence zdravotnického personálu.
4. Jde o zcela bezbolestný způsob odběru vzorku z hltanu a dutiny ústní, který ani při opakovaných odběrech nedráždí sliznici.
5. Odebraný vzorek je stabilizován speciálním pufrem.

Důležité poznámky

1. GARGTEST samoodběrovou sadu nepoužívejte, pokud je poškozená nebo vypršela její expirační doba uvedená na obalu.
2. Odběrová souprava je určená výlučně k jednorázovému použití.
3. Jemný prášek na dně odběrové zkumavky obvykle vytváří tvrdou homogenní vrstvu. Rozpadnutí této vrstvy není poškozením výrobku a neovlivňuje jeho funkčnost. Prášek nevdechujte ani nepožívejte.
4. Odebraný biologický materiál musí být zamrazen do 24 hodin od odběru minimálně na -10 °C.



DISTRIBUTOR:
I.T.A. – Intertact, s.r.o.
www.ita-intertact.com
ita@ita-intertact.com
+420 224 810 196



IntellMed, s.r.o.

VÝROBCE:
IntellMed, s.r.o.
www.intellmed.eu
sales@intellmed.eu

www.comfortlab.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Při samotném odběru přesně dodržujte uvedené instrukce, případně se řiďte pokyny odběrového místa. Před použitím testu si dobře umyjte ruce! Elektronickou žádanku najdete na webu www.comfortlab.cz.

ODBĚROVÁ SADA OBSAHUJE:

- transportní plastovou zkumavku
- jednorázovou odměrku na vodu

v samostatném plastovém sáčku

Rev. 16/25



1

Otevřete sáček a vyndejte jeho obsah.



2

Napusťte vodu do přiložené odměrky přesně po rysku 5 ml.




3

Zhluboka se nadechněte a zakašlejte. Tím zvýšíte pravděpodobnost zachytu infekce z dolních cest dýchacích.



4

Obsah odměrky vlejte do úst - nepolykejte! Pokud omylem polknete, postup opakujte od bodu 2.

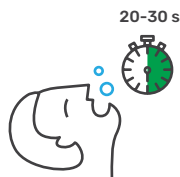


5

Kloktejte v rozmezí 20 až 30 vteřin. Kloktat můžete i přerušovaně, dodržte však dobu kloktání.



6

Vykloktaný obsah úst vyplivněte zpět do odměrky.

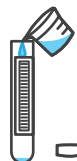

7

Vykloktaný obsah odměrky opatrně přelijte do přiložené zkumavky. Ve zkumavce je stabilizační prášek, který nesmíte vyspat.



8

Zkumavku pečlivě uzavřete a protřepejte, případně označte dle pokynů odběrového místa.



9

Uzavřenou zkumavku vložte do sáčku anebo na místo určené pracovníkem odběrového místa, a takto předáte k vyšetření.

Vzorek zamrazte do 24 hodin od odběru. Skladujte při teplotě pod -10 °C.